


De Easy On/Off is een hulpmiddel dat het aan/uittrekken van therapeutisch elastische kousen makkelijker maakt. Door de vorm van de zak, die uit drie lagen glad materiaal bestaat, zal de kous makkelijker aan- en uit te trekken zijn.

Easy On/Off

aan/uittrekhulp voor arm- & beenkousen

One size

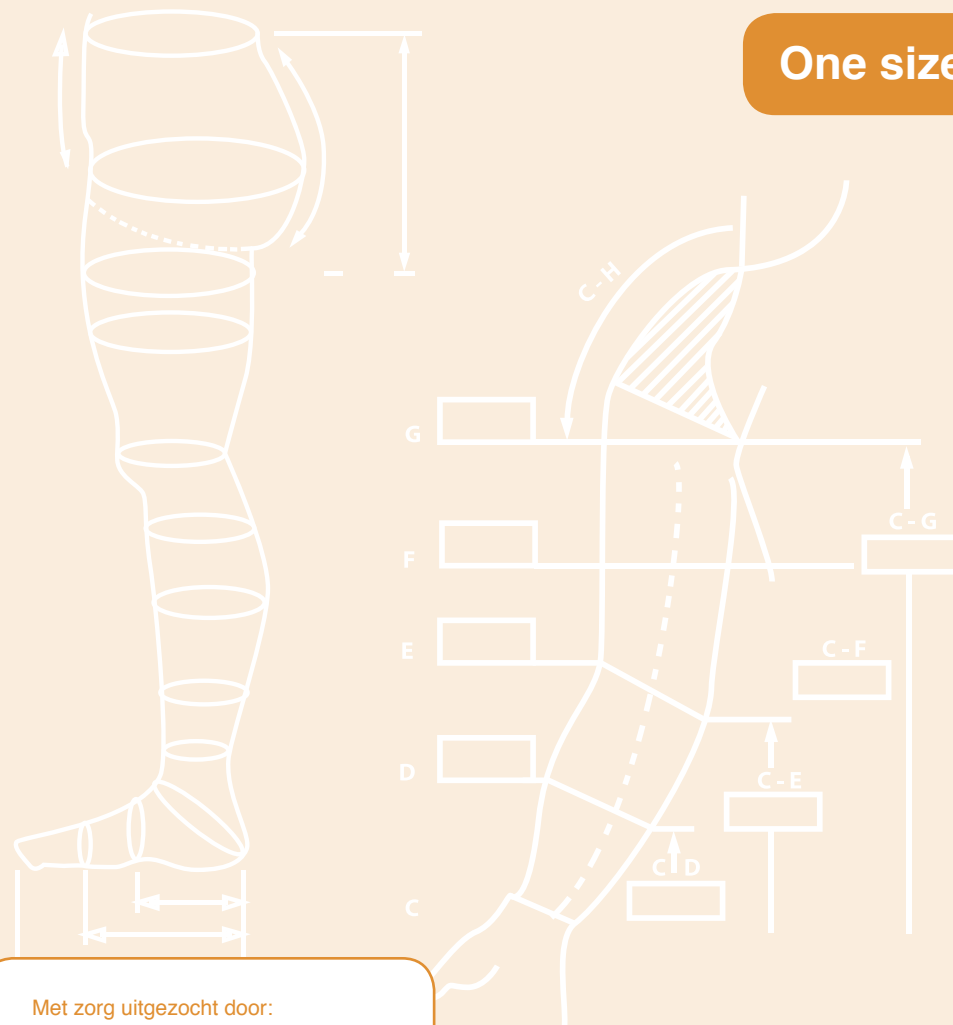

Wasvoorschrift

- De Easy On/Off op de hand wassen op een lage temperatuur - max. 30°C
- Na het wassen de Easy On/Off met een doek afdrogen en aan de lucht drogen
- Leg de Easy On/Off niet op een verwarming of andere warmtebron
- Stop de Easy On/Off niet in een droger



FYSIOTEK

Postbus 395
6800 AJ Arnhem

T +31 (0)26 446 31 75
F +31 (0)26 446 31 76

E: info@fysiotek.nl | www.fysiotek.nl

Met zorg uitgezocht door:

FYSIOTEK



Gebruiksaanwijzing Easy On/Off

TIP: Gebruik bij het aantrekken van de kous speciale rubberen handschoenen.

Aantrekhelp beenkous open en gesloten teen:



Uittrekhelp beenkous open en gesloten teen:



Aantrekhelp armkous:

