

Onderhoudsinstructies aan- en uittrekhulpmiddelen

Glijzak



Glijzakken als de Easy On verminderen de wrijving tussen de huid en de kous waardoor de therapeutisch elastische kous makkelijker over een arm of been glijdt. Hierdoor hoeft de gebruiker, de thuiszorgmedewerker of de mantelzorger minder kracht te leveren bij het aantrekken van een compressiekous.

Een glijzak mag alleen met de hand worden gewassen. Dit kan met een mild wasmiddel bij maximaal 30 graden Celsius. Na het wassen kan de glijzak met een handdoek worden afgedroogd en weer in gebruik worden genomen. Het materiaal waarvan de glijzak is gemaakt is niet bestand tegen (warmte)bronnen als:

- Droogtrommel
- Het strijkijzer
- Direct zonlicht
- De verwarming
- Chloor
- Chemische reiniging.

Doff n' Donner

De Doff n' Donner dient, bij voorkeur om de zwartrode paal, op kamertemperatuur te worden bewaard. Wanneer nodig U kunt de roze gekleurde Doff n' Donner schoonmaken met water en antibacteriële (bij voorkeur) of normale zeep. Desinfectie van de Doff n' Donner kan het beste door gebruik te maken van isopropyl alcohol.



Let op!

De Doff 'n Donner is gevuld met zeepachtig water. Contact met scherpe voorwerpen als scherpe nagels of sierraden kan leiden tot lekkage van de Doff n' Donner.

Handylgs



De HandyLegs kan worden schoongemaakt met een stevig uitgewrongen, vochtige doek. Naast water mag de doek voorzien zijn van een milde zeepoplossing. Indien er zeep wordt gebruikt is het van belang om de zeepresten zo goed mogelijk te verwijderen met een schone, vochtige doek.

De neopreen bekleding dat rond het scharnier zit kan met de hand worden gewassen op 30 graden Celsius.